

IMJ リムホルダー(品番:12500)

<結び方の参考例>



① 患者から見て手前に
通し穴が来るように
患者の腕にのせる

1回転



② 反対側の紐を通し穴
に入れ、手前に引く

2回転



③ さらに同じことを
もう1度繰り返す

3回転



④ 2本の紐をそろえる



⑤ 回した紐を片手で持
ち他方を上から回す



⑥ 長さが同じになった
2本の紐を結び合わ
せる

材質

ポリエステル不織布、ポリエステルフォーム

破断荷重

リムホルダーを引っ張って切れた時の荷重(参考値)

- 一重 : 58kg
- 二重 : 113kg