

Pocket Air™

Portable Nebulizer



♥ *Ideal choice of respiratory treatment*

傾けても薬が漏れません

小さなお子さまを抱っこしたままご使用いただけます。

とても静かです。

動作音は50dB未満
(周囲1メートル)
どこでも気兼ねなく使えます。

軽量・コンパクト

重さは約74g(電池は含まない)
外出時に便利です。

電池・USB ケーブル

単三乾電池2本、または付属の
USBケーブルが使えます。

霧状の薬液を噴霧

空気を多く取り込み、薬液を細かな
霧状にして噴霧します。

シンプル設計

ネブライザ本体に薬液カップを
取り付けるだけ。面倒なパーツは
不要です。



株式会社インターメド ジャパン

ポケットエアの使い方



1 +/-の表記に従って
単3形電池2本を
挿入します



2 薬液カップを
取り付けます



3 処方された薬液を
薬液カップに注ぎます



4 吸入マスクを
取り付けます



5 口と鼻を覆うように
吸入マスクをかぶせます



6 電源ON/OFFボタンを押し
通常通り呼吸します



7 吸入が終了したら
電源ON/OFFボタンを
押します



商品情報

製品番号	製品名	サイズ	セット内容
MBPN002	Pocket Air ポータブルネブライザ	高73×幅41×奥76.5mm	メインユニット、薬液カップ、吸入マスク、 取扱説明書、ソフトケース

販売名: ポケットエア 医療機器届出番号: 27B1X0000200025 JMDNコード: 12719000

オプション

製品番号	製品名
MBPN00201	薬液カップ
MBPN00203	吸入マスク(小児～成人用)
MBPN00204	吸入マスク(乳幼児用)
MBPN00208	USB ケーブル

小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2012

ブテソニド吸入懸濁液の使用について、ジェット式
ネブライザーに加え、メッシュ式ネブライザーの使用も
推奨*されています。

* 軽症持続型と中等持続型の重症度の場合

製造販売元



<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社: 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 北浜MIDビル14階
TEL06-6222-1951(代)・FAX06-6222-1950

東京支店: TEL03-5363-8460・FAX03-5363-8465

大阪支店: TEL06-6222-1957・FAX06-6222-3760

福岡支店: TEL092-451-2459・FAX092-451-2419

仙台営業所: TEL022-719-7666・FAX022-719-7654

名古屋営業所: TEL052-741-7124・FAX052-741-7125



ショップ デクリニック

ご購入はこちらから:

<http://item.rakuten.co.jp/shopdeclinic/mbpn002/>

バイオメディカルネット株式会社 通販事業部

TEL: 03-5840-9868 ・ FAX: 03-5840-8173



P190901-1909-03-2500-3