



Alpha Pro Tech N-95 マスク

フェイシャルロック方式
- マジックアーチとツイストシールで密着フィット -



装着方法



ステップ1

片方の手でマスク上側（鼻側）のアルミバーをつかみ、もう片方の手の指をマスク下側（顎側）のアルミバーの内側に入れます。



ステップ2

マスク下側（顎側）のアルミバーを引っ張り、マスクを十分に開きます。（マスクを十分に開くことが重要です）。



ステップ3

開いたマスクの内側に顎を入れます。ヘッドバンドを伸ばして後頭部に回し、下側のバンドを耳の下、顎部の後ろに掛け、上側のバンドを頭頂部近くに掛けます。



ステップ4

アルミバーを鼻および頬骨の輪郭に合わせて調節します。さらに、中央部のポリプロピレンバーを十分に伸ばして、鼻と口から離し、マスクの内側に空間を確保します。



ステップ5

片方の手で上側のアルミバーを保持し、もう片方の指を下側のアルミバーの内側に入れてそっと下側に下げてマスクを顔に沿わせます。



ステップ6

マスクの下側に隙間ができるときは、顎の下でアルミバーを折り重ねるか、ねじって隙間をなくします。



ステップ7

シールチェックテスト：マスクの上と下の端に両手を沿えて息を吐き出します。鼻の周りから空気が漏れるときは上側のアルミバーを調節し、顎側から空気が漏れるときは、下側のアルミバーの折り畳みを広げるか、ねじれを解いて5と6の手順を行ってください。



ステップ8

フェイシャルロック方式のマスクを正しく装着できました。

警告

1. 本製品によって、疾病および感染症への罹患リスクを排除することはできません。N95マスクが体液を含む、血液および液体に接触したときは、直ちにマスクを交換してください。OSHAでは、空中浮遊有害物質の許容暴露レベルは設定されていません。
2. 本製品は、使用方法および警告に従ってお使いください。使用方法および警告に従わなかった場合は、製品の効果が下がり、着用者を適切に保護できず、罹病または死亡を引き起こす恐れがあります。疾病および感染症に暴露している間は常にN95を装着してください。

3. 着用者は、担当の作業現場での汚染物質および暴露レベルに対して適用される安全および健康基準に従って、N95マスクの使用前に雇用主から正しい使用に関するトレーニングを受けなければなりません。

ポジティブフェイシャルロック（PFL）、マジックアーチ、ツイストシールは、Alpha Pro Tech社の登録商標です。

AlphaProTech社製 マスクN95（品番 62700）

AlphaProTech
INCORPORATED