

# DEA 口腔ケアキット

*Kit For Oral Hygiene*



# 集中治療領域における VAP予防のための口腔ケア

キット品の  
ポイント

- 洗浄不要のシングルユース製品
- 準備・後片付けの時間短縮・労力削減に貢献
- キット化による口腔ケア手技の統一化

## キット内容

### 吸引付き歯ブラシ

- 吸引調節口を指で押さえることでON/OFFの切換えができます
- 吸引調節口から汚染物が飛散しにくい形状です

### スポンジブラシ

- 汚れをしっかりと絡めとります
- 柄が丈夫で弾力性があり、頬の内側や口蓋部も清掃しやすいです

### ハイジコル マウスウォッシュ

- ブラッシング時に使用します
- 歯や粘膜に付着した歯垢や剥離上皮を取り除きやすくします

### ハイジゲル マウスジェル

- 口腔内の乾燥を防ぎます
- ビタミンE誘導体(保湿剤)として酢酸トコフェロールを配合しています

販売名:ハイジコル マウスウォッシュ  
<液体歯みがき> 10mL

【使用方法】  
適量をスポンジブラシもしくは歯ブラシに浸し、歯及び口腔内をブラッシングしてください。

【使用上の注意】  
内服液ではありませんので飲み込まないでください。痛みやかゆみ、腫れなどの異常があらわれた場合には使用を中止し、医師、歯科医師または薬剤師にご相談ください。乳幼児の手の届かない所に保管してください。目に入った時は、こすらずに水で十分に洗い流してください。直射日光のあたる所に長時間置かないでください。

【全成分】  
水、キシリトール、ソルビトール、グリセリン、PEG-40水添ヒマシ油、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、クエン酸Na、ポロキサマー407、香料、安息香酸Na、サッカリンNa、クエン酸、黄4、青1

【製造販売元】  
株式会社インターメドジャパン大阪府大阪市中央区道修町1丁目6番7号北浜ビル14階  
【お問い合わせ先】06-6222-1951



PE  
M  
PET

イタリア製

## 使用例

準備

ハイジコル マウスウォッシュをパッケージの円形部分に注ぐ



ブラッシング

吸引付き歯ブラシをハイジコル マウスウォッシュに浸し、  
歯をみがく ▲(ブラッシングによって粘膜や歯肉から出血を引き起こす場合、吸引付き歯ブラシの裏側にあるスワブかスポンジブラシを使用)

- ✓ 約1~2分間ブラッシング
- ✓ 水平、あるいは円を描くように動かしながら、やさしい圧でブラッシング
- ✓ 口腔の奥から手前に汚染物を除去

舌の表面をブラッシングする

汚染物  
回収

歯垢等が咽頭へ落下すると誤嚥のリスクが高まるため、ブラッシングで除去した後は  
吸引付き歯ブラシなどで必ず回収する

清拭

粘液や残渣を除去するため、スポンジブラシを時計回りに回転させ、口腔内を清拭する


保湿

ハイジゲル マウスジェルを口腔内に薄く塗布、または歯茎をマッサージする  
使用後、余分なものは拭き取る

乾燥が強い場合は、ハイジゲル マウスジェル塗布の前に生理食塩水などを口腔内にスプレーする

ブラッシングケアとブラッシングケアの間にも、口腔の湿潤度を細かくチェックして  
必要に応じてハイジゲル マウスジェルを塗布する

ICUなどで人工呼吸管理下にある患者さんは、経口気管挿管や気管切開をされていることが多く、良好な口腔環境を維持することが困難です。口腔環境の悪化は呼吸器感染症のリスクとなるため、口腔ケアは、口腔機能の維持や口臭予防だけでなく呼吸器感染の予防のために行われます。特に人工呼吸器関連肺炎(VAP)は集中治療領域における最も頻度の高い感染症の1つで、VAPの多くは汚染された口腔咽頭の原因菌が、気管チューブの外側から流れ込み肺に侵入することによって発症すると考えられています。よって、VAPの感染予防の1つとして適切な口腔ケアは極めて大切です。

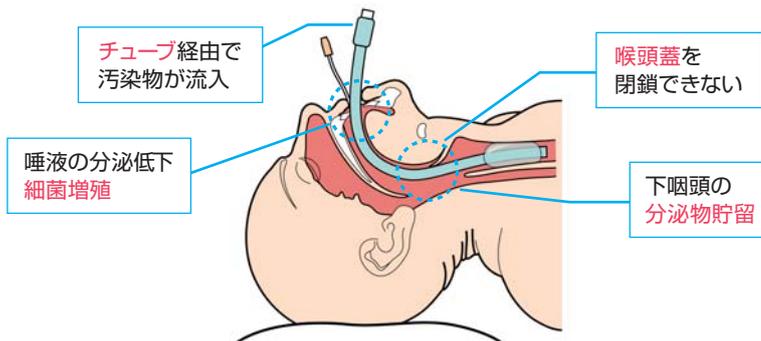

兵庫医科大学  
歯科口腔外科学  
岸本 裕充 教授

# より効果的な口腔ケアのために

## iR ET-CARE™

### 気管内チューブホルダー

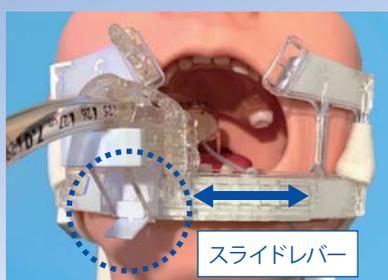


図1



図2

#### 特徴

##### ■ユニークなチューブ固定法

気管内チューブおよびNGチューブの固定にテープを使わないため、手袋をしたままでも装着可能。

##### ■独自のスライドシステム

気管内チューブを固定したまま左右にスライドできるため、抜管のリスクを低減しつつ口腔ケアの時間短縮に貢献。(図1)

##### ■抗菌タイプのソフトクッション

抗菌性フォーム。  
やわらかいクッションのため、唇や顔の皮膚への刺激を軽減。(図2)

#### 【製品情報】

品番	品名	包装単位
K1578B	DEA口腔ケアキット※1	36キット/箱
11003	気管内チューブホルダーファストストラップ※2	5セット/箱

※1 キット内に化粧品(液体歯みがき、口腔化粧品)を含む

※2 法第二条第四項適用外

製造販売元

代理店

 株式会社インターメド ジャパン

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社：〒541-0045大阪府中央区道修町1丁目6番7号 北浜MIDビル14階  
TEL 06-6222-195(代) FAX 06-6222-1950

東京支店：TEL 03-5363-8460  
：FAX 03-5363-8465

大阪支店：TEL 06-6222-1957  
：FAX 06-6222-3760

福岡支店：TEL 092-451-2459  
：FAX 092-451-2419



●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。

●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧下さい。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

DE200501-2109-03-1003-05