


air-Q[®]3

air-Q[®]3 声門上エアウェイ

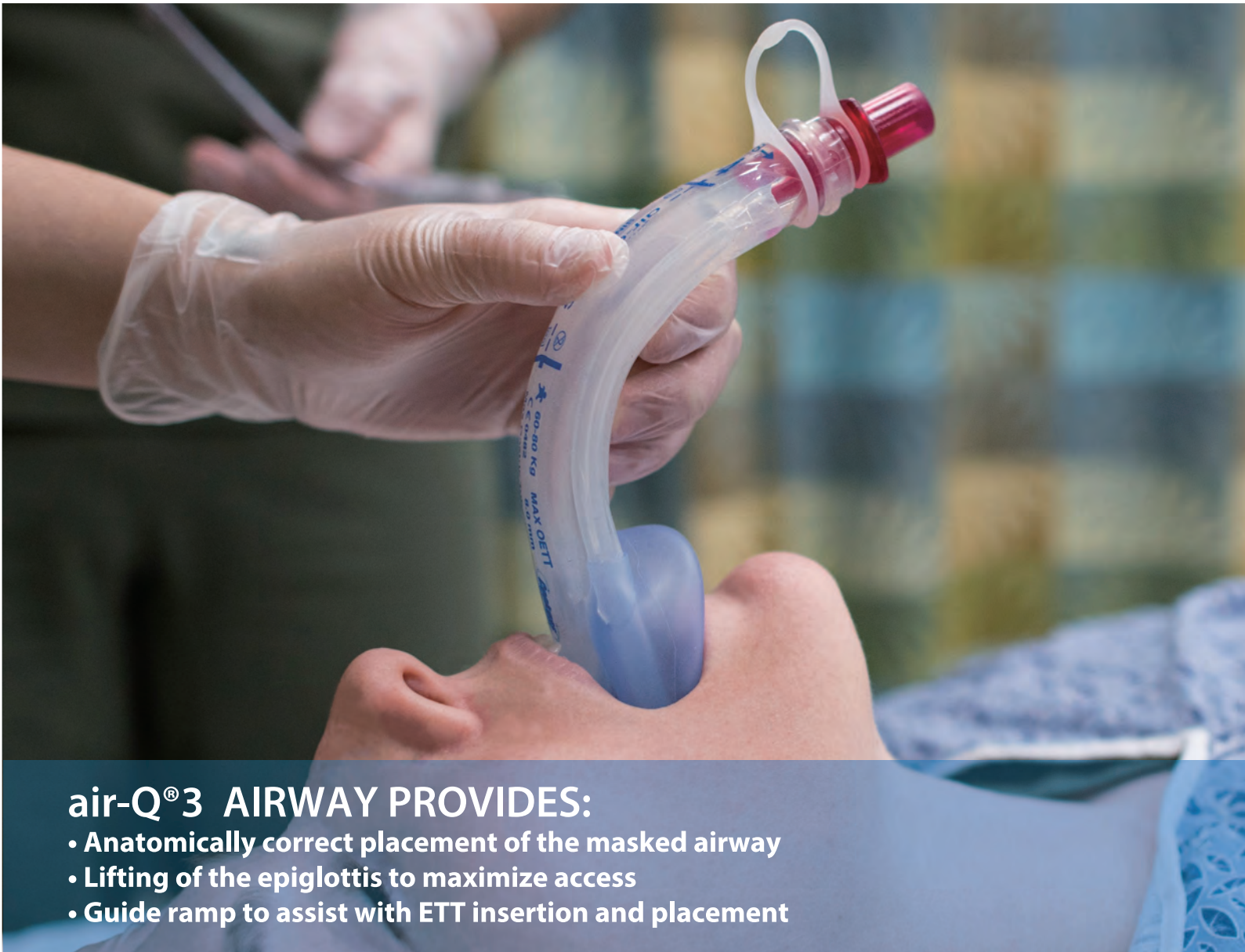

air-Q[®]3 AIRWAY PROVIDES:

- Anatomically correct placement of the masked airway
- Lifting of the epiglottis to maximize access
- Guide ramp to assist with ETT insertion and placement

air-Q®3 声門上エアウェイ SUPRAGLOTTIC AIRWAY (SGA)

air-Q®3 シリーズはシリコン製で特徴のある4つのタイプをラインナップしました。スタンダードなair-Q®3に加え胃管チャンネルを2つ有するGタイプと自然にカフが膨らむSPタイプにより様々なシチュエーションに対応します。



air-Q®sp3G

2つの胃管チャンネルにより、腹部へのアクセスを可能とします。陽圧換気ガスを利用する自己膨張式のカフが特徴です。患者ごとに最適化された圧力でカフが自然膨張し、シーリング効果を生み出します。



air-Q®3G

最大18Frの胃管チューブに対応する、2つの胃管チャンネルにより、腹部へのアクセスを可能とします。



air-Q®sp3

陽圧換気ガスを利用する自己膨張式のカフが特徴です。患者ごとに最適化された圧力でカフが自然膨張し、シーリング効果を生み出します。



air-Q®3

スタンダードの声門上エアウェイです。緊急で気管挿管が必要な場合に気管チューブの装着を容易にします。

air-Q®3シリーズの特徴

エアウェイチューブ両側に
胃管チャンネルを装着
(air-Q®3G, air-Q®sp3G)

取り外し可能な
ストラップ付
15mmコネクタは
サイズ毎にカラーコード化

エアウェイチューブの
喉頭蓋エレベータまでの長さ
サイズ

デプスマーク/
一体型バイトブロック

適用患者体重


挿入可能な
気管チューブの
最大サイズ(I.D.)

最大カフ内圧*
(air-Q®3, air-Q®3G)

*カフが自然膨張するSPタイプには
カフ内圧の表示はありません。

挿入可能な
胃管チューブの
最大サイズ

(air-Q®3G, air-Q®sp3G)

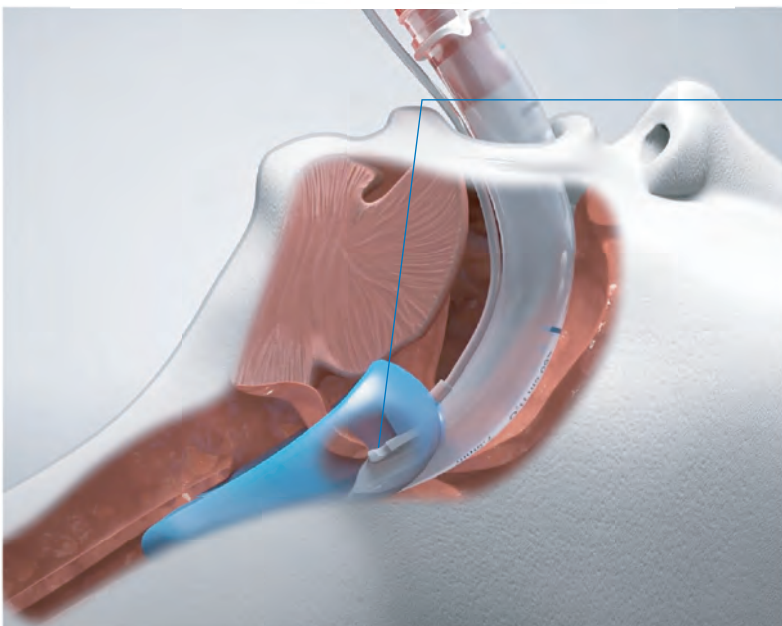

密閉性を高める
ビルドアップマスクヒール

喉頭蓋エレベータ

ETチューブランプ
気管チューブを
喉頭入口に向け
気管内挿管を
サポートします





air-Q®3

品名	品番	サイズ	患者の体重	挿入可能な気管チューブの最大サイズ	最小開口幅	開口部までのチューブの長さ	挿入可能な胃管チューブの最大サイズ	推奨空気注入量※	包装単位
air-Q3	10-30005	0	<2kg	3.0mm	5mm	6cm		0-0.5mL	5本/箱
	10-30055	0.5	2-4kg	4.0mm	8mm	7cm		0-0.5mL	
	10-30105	1.0	4-7kg	4.5mm	11mm	9cm		0.5-1mL	
	10-30155	1.5	7-17kg	5.0mm	14mm	11cm		1mL	
	10-30205	2	17-30kg	5.5mm	17mm	14cm		1-2mL	
	10-30305	3	30-60kg	7.0mm	20mm	16cm		2-3mL	
	10-30405	4	60-80kg	8.0mm	23mm	18cm		3-4mL	
	10-30505	5	>80kg	9.0mm	25mm	20cm		4-5mL	
air-Q3G	10-50005G	0	<2kg	3.0mm	5mm	6cm	5Fr	0-0.5mL	
	10-50055G	0.5	2-4kg	4.0mm	8mm	7cm	6Fr	0-0.5mL	
	10-50105G	1.0	4-7kg	4.5mm	11mm	9cm	8Fr	0.5-1mL	
	10-50155G	1.5	7-17kg	5.0mm	14mm	11cm	8Fr	1mL	
	10-50205G	2	17-30kg	5.5mm	17mm	14cm	10Fr	1-2mL	
	10-50305G	3	30-60kg	7.0mm	20mm	16cm	14Fr	2-3mL	
	10-50405G	4	60-80kg	8.0mm	23mm	18cm	16Fr	3-4mL	
	10-50505G	5	>80kg	9.0mm	25mm	20cm	18Fr	4-5mL	
air-Qsp3	10-40005	0	<2kg	3.0mm	5mm	6cm			
	10-40055	0.5	2-4kg	4.0mm	8mm	7cm			
	10-40105	1.0	4-7kg	4.5mm	11mm	9cm			
	10-40155	1.5	7-17kg	5.0mm	14mm	11cm			
	10-40205	2	17-30kg	5.5mm	17mm	14cm			
	10-40305	3	30-60kg	7.0mm	20mm	16cm			
	10-40405	4	60-80kg	8.0mm	23mm	18cm			
	10-40505	5	>80kg	9.0mm	25mm	20cm			
air-Qsp3G	10-60005G	0	<2kg	3.0mm	5mm	6cm	5Fr		
	10-60055G	0.5	2-4kg	4.0mm	8mm	7cm	6Fr		
	10-60105G	1.0	4-7kg	4.5mm	11mm	9cm	8Fr		
	10-60155G	1.5	7-17kg	5.0mm	14mm	11cm	8Fr		
	10-60205G	2	17-30kg	5.5mm	17mm	14cm	10Fr		
	10-60305G	3	30-60kg	7.0mm	20mm	16cm	14Fr		
	10-60405G	4	60-80kg	8.0mm	23mm	18cm	16Fr		
	10-60505G	5	>80kg	9.0mm	25mm	20cm	18Fr		

※ インフレーションバルブを開放状態にした後に、推奨する追加空気注入量

一般的名称：短期的使用口腔咽頭チューブ 販売名：air-Q3 シングルユース
 医療機器認証番号：304ADBZX00077000 クラスII
 機能区分 (1)カフあり (2)カフ上部吸引機能なし

品名	品番	air-Q3適応サイズ	包装単位
抜去用スタイルットディスポタイプ 10入	10-1006	1.0-2.0	1箱
	10-1005	2.0-3.0	1箱
	10-1004	4.0-5.0	1箱

法第二条第四項適用外



製造販売元

代理店



株式会社インターメド ジャパン

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 JMFビル北浜01 14F
 TEL06-6222-1951(代)・FAX06-6222-1950

東京支店：TEL03-5363-8460・FAX03-5363-8465

大阪支店：TEL06-6222-1957・FAX06-6222-3760

福岡支店：TEL092-451-2459・FAX092-451-2419



●本カタログに掲載の製品の仕様については、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。
 ●本カタログに掲載の製品の価格については、弊社の「標準価格表」をご覧ください。なお、標準価格は諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
 ●商品に関するお問い合わせは、最寄りの弊社各営業所へお願い致します。

S221031-2411-5-1000-10