

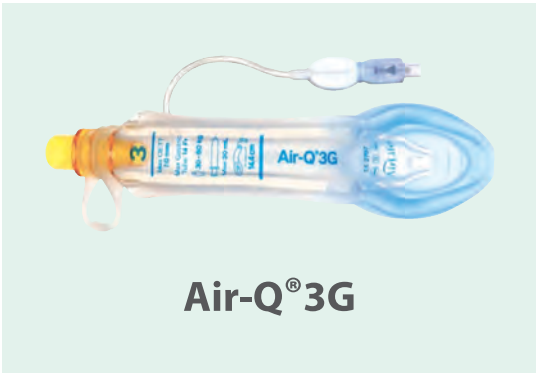
AirLife™

Air-Q® 3 声門上エアウェイ



Air-Q® 3 声門上エアウェイ SUPRAGLOTTIC AIRWAY (SGA)

Air-Q® 3シリーズはシリコン製で特徴のある4つのタイプをラインナップしました。スタンダードなAir-Q® 3に加え胃管チャンネルを2つ有するGタイプと自然にカフが膨らむSPタイプにより様々なシチュエーションに対応します。

	エア注入タイプ	自己膨張タイプ
第一世代	 Air-Q® 3	 Air-Q® sp3
第二世代	 Air-Q® 3G	 Air-Q® sp3G

Air-Q® sp 自己膨張タイプの仕組み



断面図

Air-Q® 3シリーズでは、カフにエアを入れて調整することができる従来のタイプに加え、カフ圧管理が不要な自己膨張タイプ「SP (Self-Pressurizing)」をご用意しております。SPは吸気に合わせてカフが自動で膨張するタイプになります。

SPタイプは、シャフトとカフ内腔が小さな孔で繋がっており、換気ガスがカフ内腔にも入り込む構造 (断面図) となっています。これによりカフ内外の圧力が均衡して「気道内圧=カフ内圧」となり、咽喉頭へ過剰な圧力が掛かることを防いでくれます。また患者の生体反射によりカフに強い圧が掛かった場合でも圧を逃がすことができます。

Air-Q®3シリーズの特徴





Air-Q®3

品名	品番	サイズ	患者の体重	挿入可能な 気管チューブの 最大サイズ	最小開口幅	開口部までの チューブの長さ	挿入可能な 胃管チューブの 最大サイズ	推奨空気 注入量※	包装単位
Air-Q3	10-30005	0	<2kg	3.0mm	5mm	6cm		0-0.5mL	5本/箱
	10-30055	0.5	2-4kg	4.0mm	8mm	7cm		0-0.5mL	
	10-30105	1.0	4-7kg	4.5mm	11mm	9cm		0.5-1mL	
	10-30155	1.5	7-17kg	5.0mm	14mm	11cm		1mL	
	10-30205	2	17-30kg	5.5mm	17mm	14cm		1-2mL	
	10-30305	3	30-60kg	7.0mm	20mm	16cm		2-3mL	
	10-30405	4	60-80kg	8.0mm	23mm	18cm		3-4mL	
	10-30505	5	>80kg	9.0mm	25mm	20cm		4-5mL	
Air-Q3G	10-50005G	0	<2kg	3.0mm	5mm	6cm	5Fr	0-0.5mL	
	10-50055G	0.5	2-4kg	4.0mm	8mm	7cm	6Fr	0-0.5mL	
	10-50105G	1.0	4-7kg	4.5mm	11mm	9cm	8Fr	0.5-1mL	
	10-50155G	1.5	7-17kg	5.0mm	14mm	11cm	8Fr	1mL	
	10-50205G	2	17-30kg	5.5mm	17mm	14cm	10Fr	1-2mL	
	10-50305G	3	30-60kg	7.0mm	20mm	16cm	14Fr	2-3mL	
	10-50405G	4	60-80kg	8.0mm	23mm	18cm	16Fr	3-4mL	
	10-50505G	5	>80kg	9.0mm	25mm	20cm	18Fr	4-5mL	
Air-Qsp3	10-40005	0	<2kg	3.0mm	5mm	6cm			
	10-40055	0.5	2-4kg	4.0mm	8mm	7cm			
	10-40105	1.0	4-7kg	4.5mm	11mm	9cm			
	10-40155	1.5	7-17kg	5.0mm	14mm	11cm			
	10-40205	2	17-30kg	5.5mm	17mm	14cm			
	10-40305	3	30-60kg	7.0mm	20mm	16cm			
	10-40405	4	60-80kg	8.0mm	23mm	18cm			
	10-40505	5	>80kg	9.0mm	25mm	20cm			
Air-Qsp3G	10-60005G	0	<2kg	3.0mm	5mm	6cm	5Fr		
	10-60055G	0.5	2-4kg	4.0mm	8mm	7cm	6Fr		
	10-60105G	1.0	4-7kg	4.5mm	11mm	9cm	8Fr		
	10-60155G	1.5	7-17kg	5.0mm	14mm	11cm	8Fr		
	10-60205G	2	17-30kg	5.5mm	17mm	14cm	10Fr		
	10-60305G	3	30-60kg	7.0mm	20mm	16cm	14Fr		
	10-60405G	4	60-80kg	8.0mm	23mm	18cm	16Fr		
	10-60505G	5	>80kg	9.0mm	25mm	20cm	18Fr		

※インフレーションバルブを開放状態にした後に、推奨する追加空気注入量

一般的名称：短期的使用口腔咽頭チューブ 販売名：air-Q3 シングルユース
医療機器認証番号：304ADBZX00077000 クラスⅡ
機能区分 (1)カフあり (2)カフ上部吸引機能なし

品名	品番	Air-Q3適応サイズ	包装単位
抜去用スタイレットディスプレイ 10入	10-1006	1.0-2.0	1箱
	10-1005	2.0-3.0	1箱
	10-1004	4.0-5.0	1箱

法第二条第四項適用外

製造販売元

代理店

株式会社インターメド ジャパン

<http://www.intermedjp.co.jp/>

本社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1-6-7 JMFビル北浜01 14F

TEL06-6222-1951(代)・FAX06-6222-1950

東京支店：TEL03-5363-8460・FAX03-5363-8465

大阪支店：TEL06-6222-1957・FAX06-6222-3760

福岡支店：TEL092-451-2459・FAX092-451-2419



●本カタログに掲載の製品の仕様については、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。
●本カタログに掲載の製品の価格については、弊社の「標準価格表」をご覧ください。なお、標準価格は諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●商品に関するお問い合わせは、最寄りの弊社各営業所へお願い致します。

S221031-2608-7-600-14